

ترازوی خانگی

مدل : MS 50




شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان

نماینده انحصاری محصولات کمپانی beurer آلمان در ایران

* این دستگاه شامل دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.*


راهنمای استفاده از ترازو:

- ۱- طرز استفاده: دستگاه را روی سطح کاملاً صاف و محکم قرار دهید.
دستگاه را در مجاورت منابع حرارتی قرار ندهید.

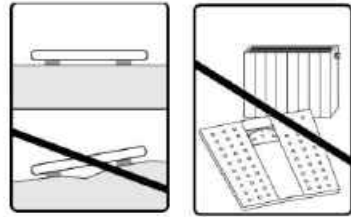

۲- وزن کردن :

- با استفاده از چرخ دنده پایین دستگاه، ترازو را روی صفر تنظیم نمایید.
با هر دو پا بر روی ترازو به صورت متعادل قرار بگیرید.

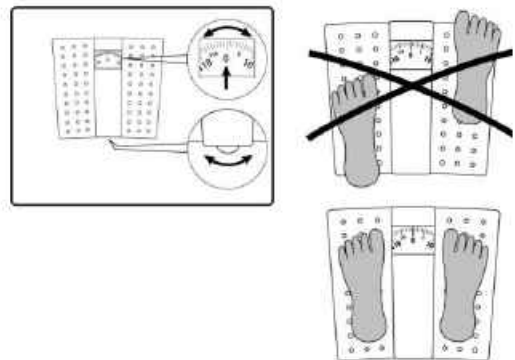

۳- تمیز کردن :

با یک دستمال مرطوب میتوانید ترازو را تمیز کنید.
از مواد شوینده برای تمیز کردن استفاده نکنید.

قابل توجه :

- بر روی ترازو بدون حرکت و با تقسیم مساوی وزن بدن بر روی هر دو پا بایستید.
- تمام ترازوهای خانگی ما از دستورالعمل اروپایی ۸۹/۳۳۶ + متمم‌های مربوط به آن پیروی می‌کنند.
- برای پاسخ به هر گونه سؤال در رابطه با طرز کار و استفاده از دستگاه خود با فروشنده و یا بخش خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- تعمیرات دستگاه باید فقط توسط بخش خدمات پس از فروش و یا عاملین مجاز صورت گیرد.



شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان
نماینده انحصاری Beurer آلمان



تهران، خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۵، شماره ۱۴

تلفن: ۶ - ۸۸۳۲۶۶۴۴

صندوق پستی ۱۸۱۸ - ۱۱۳۶۵

تلفکس: ۸۸۸۳۰۶۸۶

خدمات پس از فروش: ۸۸۸۴۰۹۷۱

info@arminدارمان.com

www.arminدارمان.com